




1. Download .ZIP file from WeTransfer link given by Dental World to your computer.
2. Unzip the file แล้วค้นหาไฟล์ชื่อ "SimpleViewerLauncher.exe" เพื่อคลิกเปิด
Unzip the file and search for the file name "SimpleViewerLauncher.exe". Double click to open it.

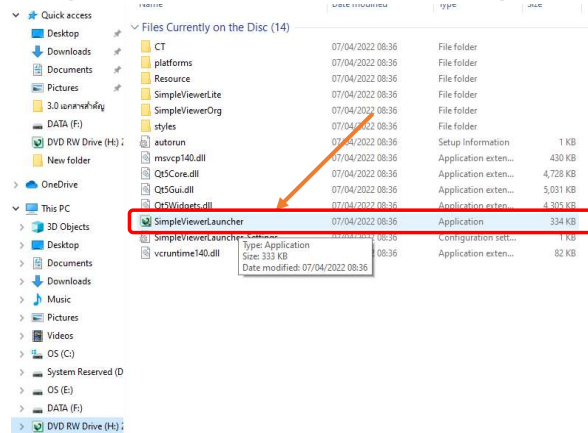


3. จะมีหน้าต่างดังรูปด้านล่างโผล่ขึ้นมา ให้เลือก "Simple Viewer Lite"
Below screen pops up, then click "Simple Viewer Lite"

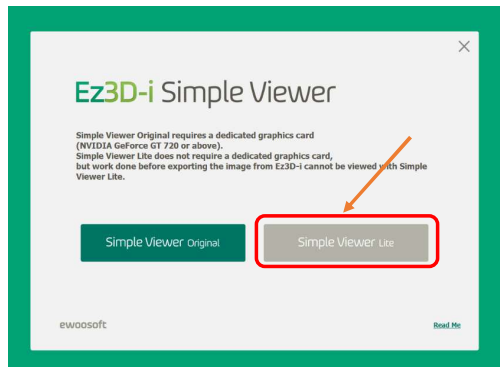

4. คลิกปุ่ม "Next". Click "Next" button.

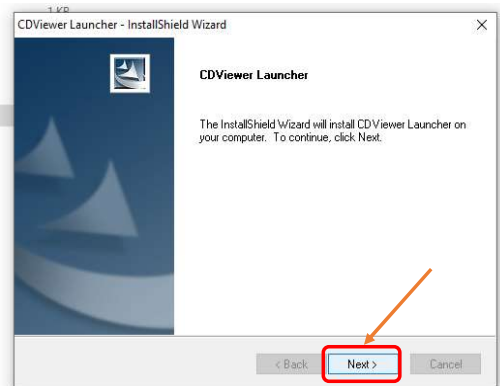

5. รอโปรแกรมโหลดสักครู่ค่ะ
Please wait until the file completely opens.

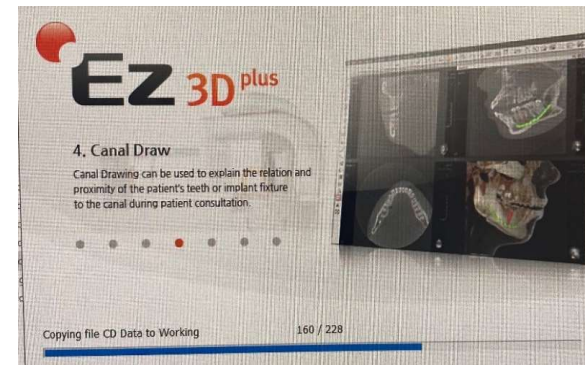

6. หลังจากโปรแกรมโหลดเสร็จก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
Finally, you can see the CT scan.

